



8 057717 110234
Z-B25-BLK100
+2.00

8 057717 110265
31Z-B25-BLK250
+2.50

8 057717 110241
Z-B25-BLK150
+2.50

8 057717 110272
31Z-B25-BLK300
+3.00

8 057717 110258
Z-B25-BLK200
+2.00

8 057717 110289
31Z-B25-BLK350
+3.50



8 057717 110173
31Z-B25-BLU100
+1.00

8 057717 110203
31Z-B25-BLU250
+2.50

8 057717 110180
31Z-B25-BLU150
+1.50

8 057717 110210
31Z-B25-BLU300
+3.00

8 057717 110197
31Z-B25-BLU200
+2.00

8 057717 110227
31Z-B25-BLU350
+3.50



8 057717 110296
Z-B25-BRO100
+2.00

8 057717 110326
31Z-B25-BRO250
+2.50

8 057717 110302
Z-B25-BRO150
+2.50

8 057717 110333
31Z-B25-BRO300
+3.00

8 057717 110319
Z-B25-BRO200
+2.00

8 057717 110340
31Z-B25-BRO350
+3.50



8 057717 110111
31Z-B25-RED100
+1.00

8 057717 110142
31Z-B25-RED250
+2.50

8 057717 110128
31Z-B25-RED150
+1.50

8 057717 110159
31Z-B25-RED300
+3.00

8 057717 110135
31Z-B25-RED200
+2.00

8 057717 110166
31Z-B25-RED350
+3.50



(IT) Occhiali premontati per presbiopia semplice. Prodotto conforme al Regolamento (UE) 2017/745 e alle norme ISO 16034:2002/Cor 1:2006, EN 14139:2010, D.m. 26/11/2004. Dispositivo Medico di classe I All. VIII Cap. 3 Regola I.

CARATTERISTICHE Distanza interpupillare: 62 mm.

AVVERTENZE Soltanto per una visione da vicino e per lettura. Non per uso regolare senza l'approvazione di un professionista qualificato. Solo esami regolari per la vista effettuati presso un oculista professionista possono determinare le necessità visive e lo stato di salute degli occhi. Non destinato alla guida o all'azionamento di un veicolo. Non destinato alla visione a distanza. Non destinato alla protezione dell'occhio.



Non idoneo alla guida ed uso su strada.

Al fine di valutare correttamente l'entità e la natura di un difetto visivo è necessario il preventivo esame della vista. In ogni caso la valutazione del difetto visivo non può essere basata sull'autodiagnosi o sulla scelta degli occhiali considerati adatti per approssimazioni successive. Gli occhiali premontati per la presbiopia, costruiti industrialmente con lenti di identico potere diottrico, sono indicati **ESCLUSIVAMENTE** per la correzione della presbiopia "semplice". Gli occhiali premontati sono indicati solo per la visione da vicino. Non devono essere usati per la guida, né per la visione da lontano, né per la protezione degli occhi. L'uso improprio ovvero l'utilizzo di una gradazione sbagliata di lenti può essere causa di vari disturbi della visione, con possibile cefalea. In tal caso è necessario un controllo oculistico. Solo il medico oculista è in grado di valutare lo stato di salute degli occhi e l'entità dei disturbi visivi. Gli occhiali premontati per presbiopia non devono essere utilizzati in caso di presbiopia "complessa". Gli occhiali premontati per presbiopia non migliorano la visione in caso di patologie dell'occhio, quali la cataratta o le degenerazioni maculari. La presbiopia è caratterizzata da un indebolimento fisiologico e progressivo della vista che si manifesta, in genere, dopo i 45 anni con una serie di disturbi quali difficoltà di leggere il giornale o di distinguere bene da vicino gli oggetti

di piccole dimensioni. La presbiopia si considera "semplice" quando per la correzione del difetto visivo, entrambi gli occhi necessitano dello stesso numero di diottrie correttive (la diottria è l'unità di misura della capacità visiva). La presbiopia si considera "complessa" in presenza di astigmatismo o di anisometropia o quando il numero di diottrie in ciascun occhio è diverso. L'astigmatismo è un difetto della vista dovuto a irregolare curvatura della cornea che determina una visione delle immagini sfuocata e deformata. L'anisometropia è caratterizzata da un differente vizio di rifrazione nei due occhi.

PRODOTTO IN RPC (Ultima revisione: 15.02.2022)

DISTRIBUITO DA ZIPPO ITALIA SRL

via Lagoscuro 5 - 19020 Vezzano Ligure - La Spezia - Italy

Phone: +39 0187 940 941 - www.zippo.it



Occhiale premontato per presbiopia semplice, Zippo.

Dimensioni

LENTE - Larghezza(mm) :	52.5
LENTE - Altezza(mm) :	32
PONTE NASO - Larghezza(mm) :	18
ASTE - Distanza (mm):	130
ASTE - Lunghezza (mm):	136

Materiale

FRONTALE :	Policarbonato
ASTE :	Policarbonato
LENTI :	Acrilico

Colore

FRONTALE :	Fucsia
ASTE :	Nero con particolari Fucsia